

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Logowanie do aplikacji

Jeśli zakupiłeś/aś nasze urządzenia, Twoje konto już na Ciebie czeka i jest gotowe do użytku. Twoje dane do logowania przysłaliśmy Tobie mailowo. Hasło będziesz mógł, a nawet powinieneś, zmienić po zalogowaniu się.



Kod QR do aplikacji
anna-24.pl



Zaloguj się

Hasło

SMS

Adres e-mail

✉ sta.zielinski@pm.me

Hasło

🔑



[Odzyskaj hasło](#)

Zaloguj się

Nie masz konta? [Zarejestruj się](#)

Kontynuując zgadzasz się z naszymi [Warunkami korzystania](#)
i [Polityką prywatności](#)

1. Wpisz adres e-mail oraz hasło wygenerowane dla Ciebie w wyznaczone pola.
2. Następnie wybierz „Zaloguj się”
3. Jeśli jest to pierwsze Twoje logowanie na danym urządzeniu, istnieje konieczność autoryzacji dwuskładnikowej.



Zaloguj się

Wymagana dodatkowa autoryzacja: zaloguj się SMS-em

Podaj e-mail konta do którego chcesz się zalogować.
Wyślemy wiadomość sms z kodem na przypisany do niego numer telefonu.

Adres e-mail

Nie masz konta? [Zarejestruj się](#)



Zaloguj się

Podaj e-mail konta do którego chcesz się zalogować.
Wyślemy wiadomość sms z kodem na przypisany do niego numer telefonu.

Adres e-mail

Wyślemy kod weryfikacyjny na numer *****928


[Wyślij kod ponownie](#)

Nie masz konta? [Zarejestruj się](#)

Kontynuując zgadzasz się z naszymi [Warunkami korzystania](#)
i [Polityką prywatności](#)

Kontynuując zgadzasz się z naszymi [Warunkami korzystania](#)
i [Polityką prywatności](#)

- Przeniesiony do widocznego powyżej widoku, naciśnij pole „Wyślij kod SMS” a następnie wpisz 6-cyfrowy kod weryfikacyjny, który został wysłany na podany przez Ciebie numer telefonu.
- Po zalogowaniu możesz wybrać opcję zapamiętania Twojego urządzenia, co pozwoli Ci na dostęp do aplikacji Anna przez 7 dni po ostatniej aktywności bez konieczności logowania się oraz możesz unikać konieczności weryfikacji dwuskładnikowej. Jeśli chcesz jednak zachować pełne bezpieczeństwo, nie musisz zaznaczać tych opcji.

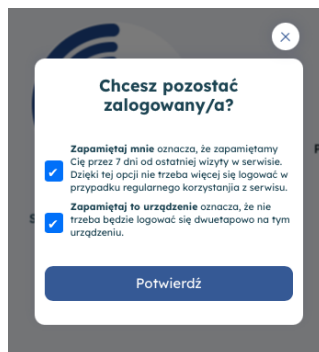

Chcesz pozostać zalogowany/a?

☒ **Zapamiętaj mnie** oznacza, że zapamiętamy Cię przez 7 dni od ostatniej wizyty w serwisie. Dzięki tej opcji nie trzeba więcej się logować w przypadku regularnego korzystania z serwisu.

☒ **Zapamiętaj to urządzenie** oznacza, że nie trzeba będzie logować się dwuetapowo na tym urządzeniu.

Uruchomienie systemu

Po udanym logowaniu do aplikacji, wystarczy, że podepniesz **AnnA Serwer GSM** do prądu zasilaczem znajdującym się w zestawie w centralnym miejscu mieszkania, najczęściej w salonie, i do aplikacji AnnA zaczną trafiać dane z urządzeń. Jeśli będziesz chciał skonfigurować system po swojemu, dowiesz się jak to zrobić w zakładce „Instalacja Systemu”.

Następnie, załóż zegarek AnnA i rozstaw czujniki zgodnie z ich przeznaczeniem. Każdy czujnik został oznaczony zależnie od lokalizacji w mieszkaniu, w której ma się znaleźć, aby system działał poprawnie. Oczywiście, ze względów estetycznych możesz usunąć oznaczenie po poprawnym rozmieszczeniu AnnA Unisensor-ów.

Czujnik Unisensor do kuchni zalecamy przyczepić do lodówki (czujniki trzymają się za pomocą wbudowanych magnesów) w taki sposób, aby czujnik zbliżenia (IRDA) wykrył jej otwarcie lub zamknięcie.

Czujnik Unisensor do łazienki zalecamy zamieścić w miarę możliwości na lub przy drzwiach, aby istniała możliwość wykrywania ich otwarcia i zamknięcia. Jeśli to okaże się niemożliwe, powinien być umieszczony w taki sposób, aby był w stanie wykryć ruch podopiecznego, gdy ten znajduje się w łazience.

Czujnik Unisensor do pokoju dziennego zalecamy rozstawić na jeden z dwóch sposobów:

1. Czujnik ruchu (PIR) w takim miejscu, aby był skierowany na jak największą przestrzeń w mieszkaniu w której może odbywać się ruch.
2. Czujnik zbliżenia (IRDA) dotykający szafki/kasetki z lekami. Przy tym jest ważne, żeby czujnik zbliżenia tylko nadał sygnał, gdy kasetka z lekami zostanie ruszana lub szafka z lekami otwarta. Ma to służyć dokładniejszej weryfikacji przyjęcia lub braku przyjęcia leków. Do tego będzie potrzebna także

konfiguracja Wirtualnego Asystenta Leków. Oczywiście, że system da się oszukać, jednak czujnik powinien być tak ustawiony, że leki nie mogą być przyjęte bez jego wykrycia. To sprawia, że jeśli otrzymasz powiadomienie o braku przyjęcia leków, możesz być pewny, że na pewno nie zostały przyjęte.

Ładowanie zegarka

W celu naładowania zegarka AnnA Watch, należy go umieścić na wyznaczonym na to miejscu na Serwerze GSM. Jeśli będzie umieszczony poprawnie, na wyświetlaczu zegarka oraz serwera pojawi się animacja ładowania.

