

KONFIGURACJA SYSTEMU

Mimo, iż nie jest konieczna konfiguracja systemu od zera, istnieje taka opcja. Poniżej dowiesz się, jak możesz to zrobić:

1. Aplikacja AnnaA
2. AnnaA Serwer GSM
3. AnnaA Watch
4. AnnaA Unisensor
5. Wirtualni Asystenci



Aplikacja AnnaA – anna-24.pl

W aplikacji AnnaA dostępne są dwa rodzaje kont: konto podopiecznego oraz konto opiekuna. Konto opiekuna umożliwia dostęp do danych wszystkich podopiecznych w jednym miejscu, co jest szczególnie przydatne, jeśli opiekujesz się więcej niż jedną osobą. Konto podopiecznego jest natomiast niezbędne do rejestracji użytkownika w systemie. Choć z tego konta mogą korzystać seniorzy, najczęściej używają go ich dzieci lub inni bliscy, którzy dbają o ich dobro. Założenie konta podopiecznego jest konieczne do konfiguracji sprzętu.

Zaloguj się na konto podopiecznego w aplikacji AnnA na stronie anna-24.pl. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się zanim przejdiesz do kolejnego kroku.



Witaj, jestem Anna!

Twoja osobista pomoc medyczna.

Zaloguj się

Nie masz konta? [Zarejestruj się](#)



Rejestracja w aplikacji AnnA

1. Wybierz opcję konta podopiecznego.
2. Wprowadź swój email i przyciśnij przycisk „zweryfikuj” obok wprowadzonego adresu email.
3. Następnie wprowadź 6-cyfrowy kod w pole, które się pojawiło.
4. Następnie wprowadź numer telefonu. W lewe pole wpisz telefoniczny kraju. Dla Polski będzie to „+48” lub po prostu „48”.
5. W prawe pole wpisz swój numer telefonu i zweryfikuj w ten sam sposób jak adres email.
6. Wprowadź bezpieczne hasło i powtórz je. Pamiętaj, aby nikomu nie udostępniać swojego hasła i zawierać w nim znaki specjalne oraz duże i małe litery.

7. Aby stworzyć konto, musisz oświadczyć, że zapoznałeś się ze wszystkimi regulaminami aplikacji i się z nimi zgadzasz zaznaczając kwadraty obok regulaminu, polityki prywatności i informacjach o RODO. Nie jest to obowiązkowe, lecz konieczne w celu stworzenia konta.
8. Po procesie rejestracji wybierz rozmiar czcionki.
9. Wybierz kontrast.
10. Następnie możesz zalogować się na swoje konto.
11. Po zalogowaniu opcjonalnie uzupełnij dane osobowe wybierając ikonkę w prawym górnym rogu.

AnnA Serwer GSM

System AnnA funkcjonuje efektywnie dzięki wbudowanemu **AnnA Serwer GSM**, który zapewnia szybki transfer danych. Użytkownik musi jedynie podłączyć go do zasilania, aby system był gotowy do użytku. Serwer ten jest kluczowym elementem łączącym wszystkie urządzenia z aplikacją. Pełni również funkcję ładowarki dla zegarka AnnA Watch, co dodatkowo podnosi jego funkcjonalność.

1. Podłącz GSM Serwer do zasilania za pomocą zasilacza zawartego w zestawie w centralnym miejscu w mieszkaniu.
2. W aplikacji przejdź do zakładki „Urządzenia”.

 Usługi

 **Urządzenia**

 Harmonogram

3. Nazwij swój dom w aplikacji i opcjonalnie dodaj adres.



< Edytuj pokoje

Dodaj dom

Nazwa Domu

Nazwa Adres (opcjonalnie)

Zapisz

4. Dodaj pomieszczenia, w których chcesz korzystać z pomiarów czujników. Zalecamy dodanie kuchni, sypialni i łazienki, lecz wybór należy do Ciebie. Wybierz typ pomieszczenia i nadaj mu nazwę.

< Edytuj pokoje

Dodaj pokój

Typ pokoju

Kuchnia

Nazwa pokoju

Moja Kuchnia

Dom


Dom Działkowa

Zapisz

5. Przytrzymaj prawy przycisk na górze serwera przez 5 sekund.
6. Na wyświetlaczu pojawi się 4-cyfrowy kod.



7. W zakładce „Urządzenia” w aplikacji wybierz opcję „Serwer GSM”, a następnie „Dodaj serwer”.

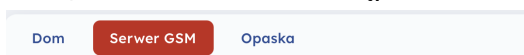

Połączone serwery GSM

Lista wszystkich przypisanych serwerów.

 DODAJ SERWER

8. Wprowadź 4-cyfrowy kod i zatwierdź.

Wprowadź PIN

Wprowadź numer PIN aby połączyć się z Twoim serwerem GSM.

Zatwierdź

Anuluj



9. W zakładce “nieprzypisane urządzenia” następnie wybierz GSM Serwer.

[< Wstecz](#)

Dodaj nowe urządzenie

Aby powiązać nowe urządzenie z Twoim kontem Anna, przyłóż je do swojego serwera GSM.

Nowe urządzenie powinno pojawić się na liście poniżej

Nieprzypisane urządzenia

10. Ostatnim krokiem jest przypisanie urządzenia do danego pokoju, w którym się znajduje.

11. Poprawnie przypisany Anna Serwer GSM powinien być w aplikacji widoczny w następujący sposób.

Anna Watch

Zegarek **Anna Watch** monitoruje najważniejsze parametry życiowe, takie jak temperatura ciała, puls, ruch, aktywność i saturację. Funkcja alarmu natychmiast powiadamia opiekunów w nagłej sytuacji. Może on także służyć do weryfikacji obecności opiekuna na wizytach

u podopiecznego poprzez przyłożenie ekranu zegarka do lewej strony Anna Serwer GSM. Obecność będzie widoczna w aplikacji.

1. **Ładowanie:** Aby poprawnie naładować Anna Watch, połóż go na wyznaczonym miejscu na górze Anna Serwer GSM




przyciskiem do siebie jak pokazane na zdjęciu.

2. Status naładowania zegarka wyświetla się na ekranie Anna Serwer GSM. Dodatkowo wyświetla się unikalny kod zegarka Anna Watch 1.
3. **Konfiguracja zegarka Anna Watch 1:** Przytrzymaj prawy przycisk na górze serwera przez 5 sekund.
4. Na wyświetlaczu pojawi się 4-cyfrowy kod.
5. Przyłóż opaskę wyświetlaczem do lewego boku serwera. Kod urządzenia powinien pojawić się na wyświetlaczu serwera.



6. Po chwili w aplikacji, w zakładce „Opaska”, powinny być widoczne parametry przypisanej opaski.

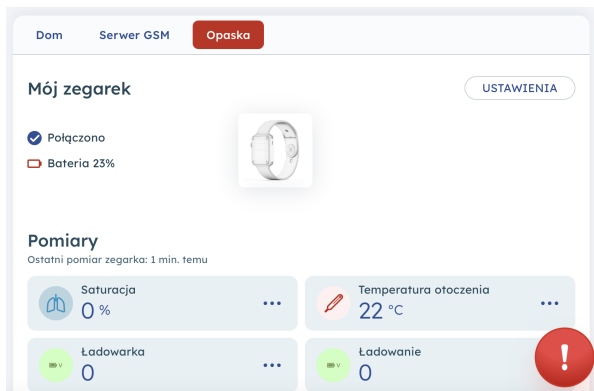


AnnA Unisensor

Zintegrowane czujniki **AnnA Unisensor 1** monitorują środowisko, w tym temperaturę, wilgotność, ruch (np. otwarcie okien i drzwi) oraz poziomy CO2 i VOC, zapewniając wszechstronne wsparcie a zarazem prywatność, rezygnując z kamer i mikrofonów. Służą także do weryfikacji przyjęcia leków lub otwarcia drzwi, okien i inne.

1. W aplikacji przejdź do zakładki „Urządzenia”, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”.

2. Wybierz opcję „Czujnik fizyczny”.

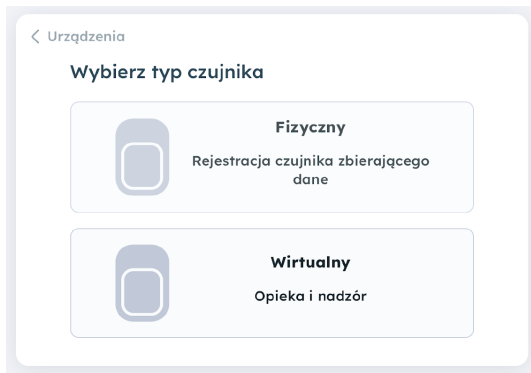

3. Przytrzymaj ponownie prawy przycisk na górze serwera przez 5 sekund.
4. Gdy wyświetli się 4-cyfrowy kod, przyłóż górną powierzchnię czujnika do lewego boku serwera GSM Anna.
5. Kod urządzenia pojawi się na wyświetlaczu serwera GSM.



6. Po chwili w aplikacji pojawi się nieprzypisane urządzenie. Nazwij je i wybierz pokój, w którym będzie się znajdować.



7. Po przypisaniu urządzenia, w wybranym pomieszczeniu widok powinien być podobny do następującego.



8. Powtórz te kroki dla kolejnych czujników.


Konfiguracja wirtualnych asystentów

W aplikacji AnnA znajdziesz funkcję Wirtualnego Asystenta, która pozwala na automatyzację i monitorowanie codziennych zadań, takich jak przyjmowanie leków czy wykonywanie zaplanowanych aktywności a także np. ocenę jakości powietrza, abyś nie musiał/a interpretować samodzielnie wartości.

1. W zakładce „Urządzenia” wybierz opcję „Dodaj urządzenie”.



2. Wybierz typ czujnika: „Wirtualny”.

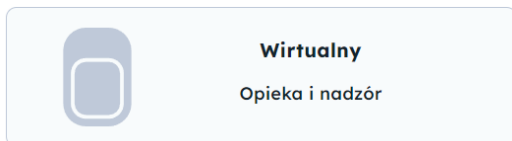

3. W zależności od tego, jakie czynności czujnik ma weryfikować, wybierz jedną z opcji:
 - i) **Asystent przyjmowania leków:** Czujnik automatycznie weryfikuje przyjęcie leków i odznacza ich przyjęcie w aplikacji, jeśli zostały przyjęte o wyznaczonej porze. Spośród zainstalowanych czujników wybierz ten, który będzie służył do weryfikacji przyjęcia leków. Następnie wybierz detektor, tj. sygnał oznaczający przyjęcie leków (np. czujnik magnesu lub czujnik bliskości – np. otwarcie szafki lub zabranie kasetki z lekami). Na koniec wybierz pokój, w którym znajduje się wybrany czujnik, i naciśnij „Dodaj”.
 - ii) **Asystent akcji:** Weryfikuje, czy zaplanowane w aplikacji zadanie zostało wykonane w określonym czasie za pomocą ruchu lub innego sygnału czujnika.
 - iii) **Asystent jakości powietrza:** Automatycznie analizuje jakość powietrza w pomieszczeniu, korzystając z pomiarów VOC. Ocenia jakość powietrza, dostarczając informacje zarówno w formie słownej oceny, jak i na intuicyjnej skali

kolorów, umożliwiając szybką i zrozumiałą interpretację danych.

- iv) **Asystent gotowania:** Automatycznie wykrywa czy w kuchni nastąpiło gotowanie.
 - v) **Asystent treningów:** Potrafi wykryć z wysokim prawdopodobieństwem, czy zaplanowany trening/ćwiczenia wprowadzone do aplikacji zostały wykonane i czy w określonym wymiarze.
 - vi) **Asystent monitorowania domu:** Wykrywa ruch w domu lub danym pomieszczeniu zależnie od konfiguracji asystenta.
4. Następnie wybierz spośród Twoich czujników w mieszkaniu ten, który ma weryfikować wybrane zadanie.
 5. Dla łatwiejszego odróżnienia nazwij asystenta zgodnie z funkcją, którą będzie pełnić.
 6. Wybierz detektor, który będzie weryfikować dane zadanie. Jeśli miałbyś mieć trudności z ustaleniem, który detektor będzie weryfikować zadanie, przejdź do następnej zakładki „Co potrafi AnnA Unisensor” w instrukcji montażu.
 7. Ostatnim krokiem będzie przypisanie wirtualnego czujnika do pokoju, w którym czujnik się znajduje i naciśnięcie przycisku „Dodaj”.

< Wybierz rodzaj wirtualnego asystenta

Przypisz czujnik wirtualny

Wybierz czujnik uniwersalny objęty nadzorem

UNISENSOR Anna 1

Nazwa asystenta (opcjonalnie)

Asystent leków

Wybierz detektor



Przypisz do pokoju

Kuchnia

Dodaj

8. Następnie wirtualny asystent pojawi się na stronie głównej.

Jeśli dotrwałeś/aś do końca, teraz już na pewno jesteś ekspertem systemu AnnA. Jeśli jednak miałyby nasuwać się Tobie jakieś wątpliwości, śmiało się z kontaktuj. Życzymy zatem owocnego korzystania 😊